

Chewy Tubes



INNOVATIVO

Dispositivo oromotorio

PER SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI
ADDENTARE E MASTICARE

Chi può usarli?

I **Chewy Tubes**[™] sono strumenti sicuri ed efficaci, adatti a bambini e adulti per esercitare la capacità di addentare e masticare. I terapeuti possono usare i **Chewy Tubes**[™] per il trattamento di chi sta sviluppando i muscoli del distretto orale o per la riabilitazione della mascella dopo interventi chirurgici, traumi o ictus. I **Chewy Tubes**[™] sono adatti anche ai più piccoli per svilupparne la capacità propriocettiva. E bimbi di soli 10 mesi hanno trovato piacevole la sensazione tattile offerta dal masticare i **Chewy Tubes**[™].



I **Chewy Tubes™** non sono consigliati per i bambini di età inferiore ai 9 mesi.

Come vengono usati?


I **Chewy Tubes™** stimolano sensazioni tattili sul locus della dentizione molare/della regione gengivale molare:

- ➊ Inserire un **Chewy Tubes™** lateralmente nella bocca.
- ➋ Appoggiare lo stelo del **Chewy Tubes™** sulla superficie dei molari/gengiva.
- ➌ La masticazione sul **Chewy Tubes™** aiuta a ottimizzare la stabilità della mascella e stimolarne le sensazioni sensoriali.

I **Chewy Tubes™** devono essere usati sempre sotto supervisione. Si consiglia la valutazione della mascella prima di iniziare a masticare i **Chewy Tubes™**. I pazienti devono seguire i consigli del loro terapeuta o caregiver per usare i **Chewy Tubes™**.

Cura e pulizia

I **Chewy Tubes™** devono essere sempre ispezionati prima dell'uso e sostituiti se presentano segni di usura. I **Chewy Tubes™** possono essere puliti lavandoli con acqua e sapone delicato.

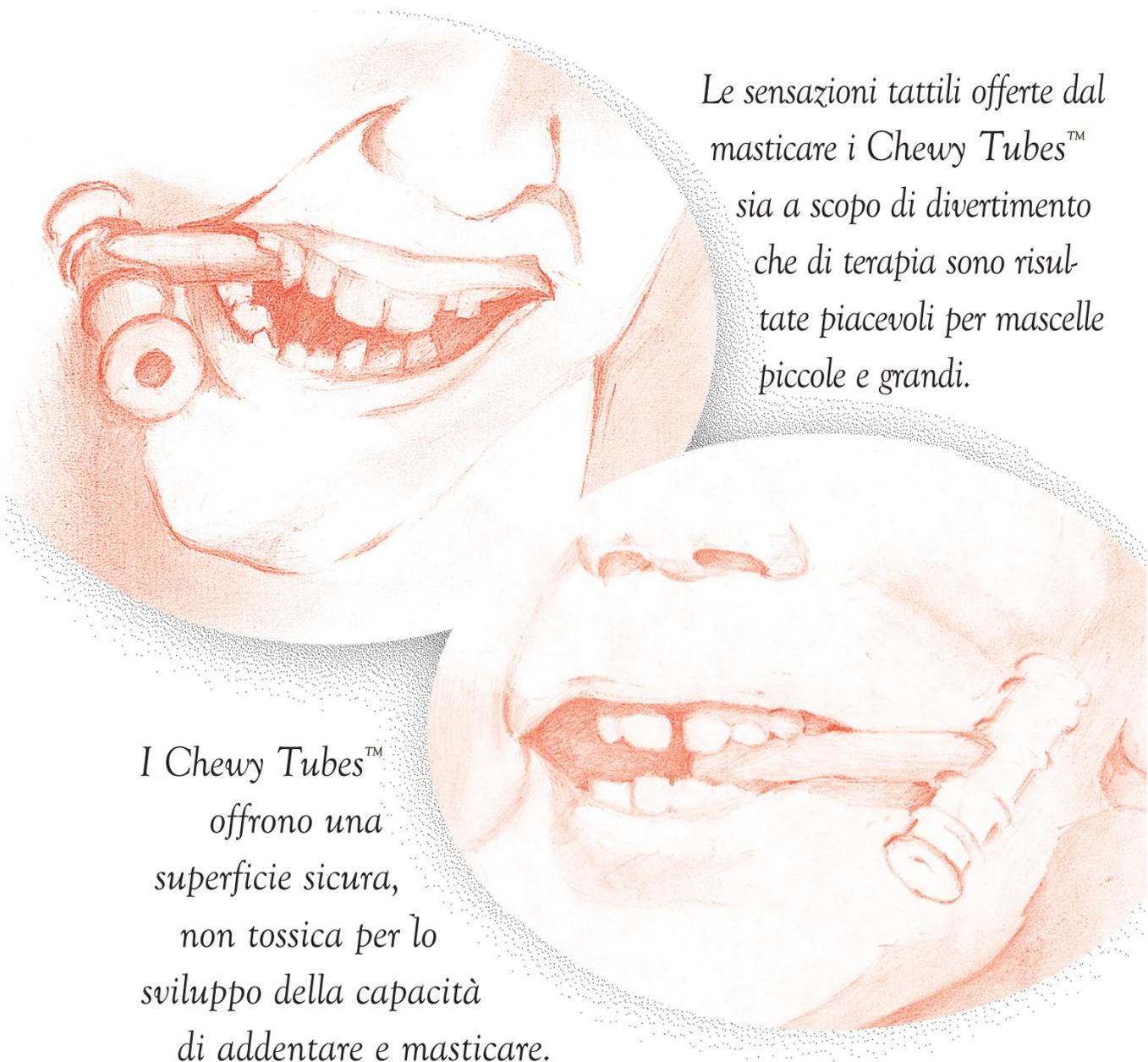

Le sensazioni tattili offerte dal masticare i Chewy Tubes™ sia a scopo di divertimento che di terapia sono risultate piacevoli per mascelle piccole e grandi.

I Chewy Tubes™ offrono una superficie sicura, non tossica per lo sviluppo della capacità di addentare e masticare.



Per un programma completo su come sviluppare la capacità di addentare e masticare, fare riferimento al PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE DELLA MASCELLA.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTARE:**

www.giocotherapy.it
info@giocotherapy.it
Tel: 379 / 233 09 94



Made in USA